




キビタン健康ネット 画像共有システム 【レポート作成】操作説明書

一般社団法人福島県医療福祉情報ネットワーク協議会

メニュー画面

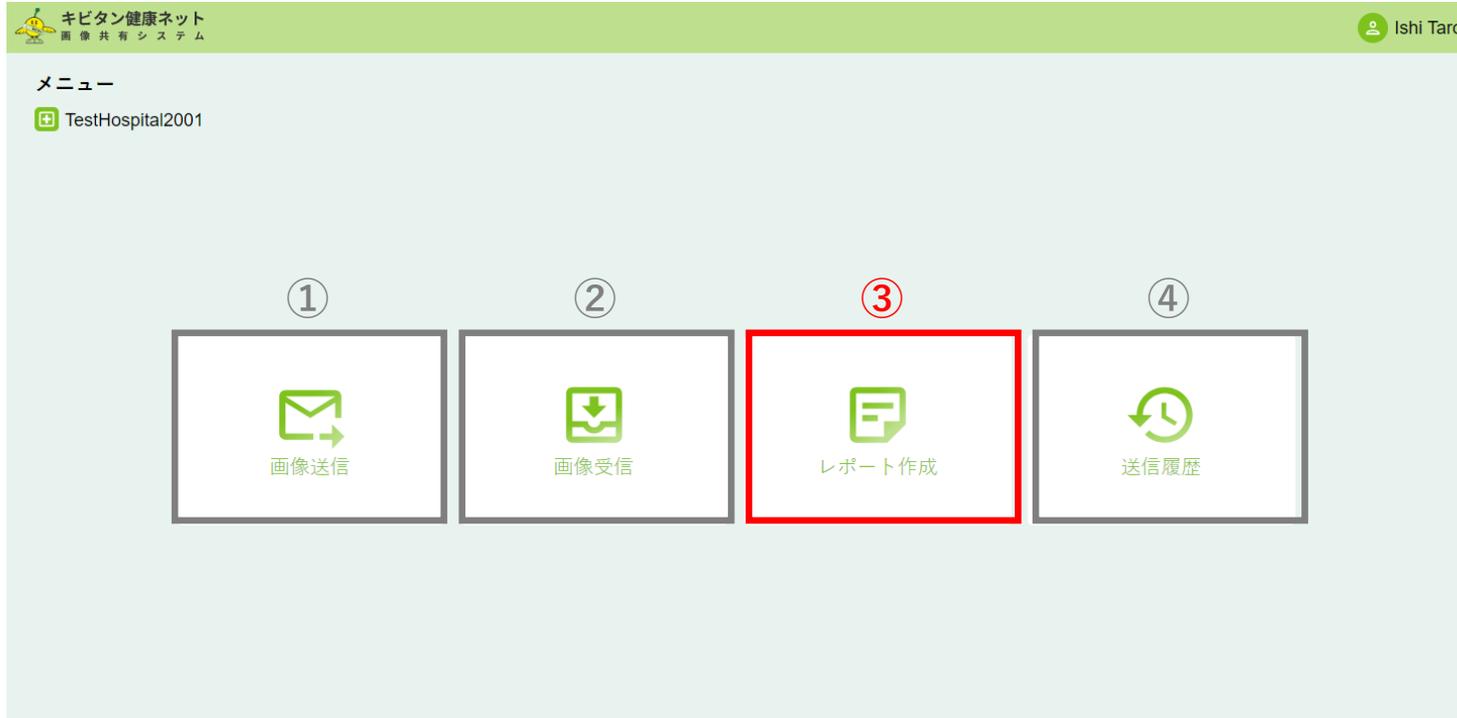

画像共有システムのメニュー画面です。
この画面から各機能にアクセスすることができます。

画像を相手先施設へ送信したい場合、**③の「レポート作成」**
を選択します。

項番 (項目名)	説明
①画像送信	DICOM画像をアップロードする画面を開きます。
②画像受信	自施設宛に送信された画像を検索する画面を開きます。
③レポート作成	自施設宛に読影依頼をされた画像を検索する画面を開きます。
④送信履歴	送信した画像の履歴を検索する画面を開きます。

レポート作成

マニュアルを見る

メニューへ戻る

協議会事務局

受信画像絞り込み

① 送信元

② キビタンID※ 070701-

③ 患者ID
(送信元の患者ID)

④ 生年月日

⑤ 送信日 ~

⑥ 送信種別 通常 緊急 救急

⑦ 読影ステータス 全て 未読 一時保存
 確定

項番 (項目名)	説明
①送信元	画像の送信元施設を絞り込みます。
②キビタンID	070701を除いたキビタンIDを入力してください(10桁)。10桁以下で入力された場合、10桁0埋めをした状態で先頭に070701を付加させて検索します。
③患者ID	送信元の患者IDで絞り込みを行います (完全一致)。
④生年月日	患者の生年月日で絞り込みを行います。
⑤送信日	画像が送信された日付で絞り込みを行います。
⑥送信種別	画像の送信種別 (通常/緊急/救急) で絞り込みを行います。
⑦読影ステータス	読影の状況により絞り込みを行います。読影種別が読影必要にチェックを入れたもののみが検索対象です。

自施設宛に送信された画像の中から読影依頼を出されたものの一覧を検索することができます。

レポート作成

マニュアルを見る

メニューへ戻る

福島県立医科大学附属病院(福島市)

受信画像絞り込み

送信元	<input type="text"/>	キビタンID※	070701-	<input type="text"/>
患者ID (送信元の患者ID)	<input type="text"/>	生年月日	yyyy/mm/dd	<input type="text"/>
送信日	yyyy/mm/dd	~	yyyy/mm/dd	送信種別 <input type="checkbox"/> 通常 <input type="checkbox"/> 緊急 <input type="checkbox"/> 救急
読影ステータス	<input checked="" type="radio"/> 全て <input type="radio"/> 未読 <input type="radio"/> 一時保存 <input type="radio"/> 確定			

キャンセル

検索

画像受信：1件

通常	読影区分	読影ステータス	送信日時	検査日	検査部位	検査種別	送信元	参照 [Viewer]
	読影必要	未読	2024/11/15 16:05:56	2016/12/30		CT	レポートを作成する	画像ダウンロード
	患者ID	キビタンID	患者氏名	生年月日	性別	送信先	レポート作成	依頼コメント確認
	10013	07070199999999 96	anonymous	1970/12/15	男	福島県立医科大学 福島市)	これは依頼コメントのテストです...	

依頼元からの依頼コメント確認
マウスオーバーすると、下部に依頼コメントが一部表示されます。(コメントはレポート作成画面で確認可能)

検索結果

通常	読影区分	読影ステータス	送信日時	検査日	検査部位	検査種別	送信元
	読影必要	確定	2020/06/30 00:00:00	2013/12/09	ALL	CT	協議会事務局
	患者ID	キビタンID	患者氏名	生年月日	性別	送信先	
	ZAd8e2747a	0707010099990 630	ZA-20131209064623.000	//	他	協議会事務局	

① 参照 [Viewer]

② 画像ダウンロード

③ レポート作成

④ 依頼コメント確認

⑤ レポート結果

項番 (項目名)	説明
①参照[Viewer]	アップロードされた画像を参照するためのViewerを開きます。
②画像ダウンロード	アップロードされた画像をDICOMDIR形式でダウンロードします (ZIP)。
③レポート作成	(読影必要の時のみ表示) レポート作成画面を開きます。
④依頼コメント確認	マウスオーバーで依頼コメントをツールチップで表示します。
⑤レポート結果	(レポート作成画面より確定をされたもののみ表示) 確定されたレポートをPDFで表示します。

レポート作成

レポート作成

協議会事務局

マニュアルを見る

レポート一覧へ戻る

未読

キビタンID

0707019999999996

依頼元施設

協議会事務局

患者ID

10013

検査日

2016/12/30

患者氏名

anonymous

モダリティ

CT

性別

M

検査部位

生年月日

1970/12/15

作成済レポート登録

レポートシステム等で作成した文書(PDF)を登録できます。

①



ここに送りたいPDFをアップしてください。
または、[ファイルを選択](#)

PDF削除

※このシステムでレポートを作成する場合は、上記「作成済レポート登録」を行わずに、以下の所見欄等に入力してレポート作成を行ってください。「作成済レポート登録」により登録を行った場合、以下の所見等を入力しても反映されません。

依頼コメント

([依頼書1](#))

これは依頼コメントのテストです。テストとテスト

画像所見

診断結果

キー画像

②

③

Viewer起動

キー画像取込

⑥

⑦

一時保存

確定

定型文

過去リスト

④

新規登録

⑤

編集

タイトル

所見なし

作成された定型文をダブルクリックすると、左側の所見に自動入力されます。

それぞれの意味合いは次ページ参照

レポート作成（機能）

ユーザー（読影医）毎に定型文を登録することが可能です。

過去に読影実施の履歴がある患者であれば、過去の所見を確認することが可能です。
※キビタンIDが同一であることが条件です。

項番（項目名）	説明
①作成済レポート登録	他システムで作成したレポート(PDF)をこちらから登録できます。この際、画像所見と診断結果は入力できません。
②Viewer起動	画像登録（アップロード）された画像を表示するViewer（ビューワー）を起動します。
③キー画像取り込み	②で開いたViewerから指定されたキー画像をレポートに取り込む操作を行います。
④定型文-新規登録	定型文を新規登録します。
⑤定型文-編集	指定された定型文の編集、削除を行います。
⑥一時保存	入力された画像所見と診断結果、キー画像を一時保存します。
⑦確定	入力された画像所見と診断結果、キー画像で確定します。 ①でPDFを指定した場合は登録されたPDFで確定します。

レポート作成 (キー画像取り込み)

キビタン健康ネット
画像共有システム

レポート作成

協議会事務局

未読

キビタンID
070701999999996

依頼元施設
協議会事務局

患者ID
10013

検査日
2016/12/30

患者氏名
anonymous

モダリティ

作成済レポート登録
レポートシステム等で作成した文書(PDF)を登録できます。

ここに送りたいPDFをアップしてください。
または、[ファイルを選択](#)

PDF削除

※このシステムでレポートを作成する場合は、上記「作成済レポート登録」を行わずに、以下の所見欄等に入力してレポート作成を行ってください。「作成済レポート登録」により登録を行った場合、以下の所見等を入力しても反映されません。

依頼コメント (依頼書1)

これは

所見

結果

画像

Viewer起動 キー画像取込

一時保存 確定

貼り付けられた「キー画像」をクリックすると拡大表示され、画像を確認できます。
※削除したい場合は、削除ボタンで削除してください。

まず、「Viewer起動」ボタンを押して画像ビューワを立ち上げてください。

画像ビューワの右上にあるボタンを押したら、レポート作成画面に戻り、「キー画像取込」ボタンを押します。複数枚指定したい場合は、繰り返してください。

入力が終わったら確定ボタンを押す

0707010099990630 ZA- user

View Measure Divide

2013/12/09
Se: 11
Im: 5 / 6

null

矢印など必要事項を描き終わり次第、ボタンを押します。

R L

W:380 L:60
倍率 x 1.29

11
6
23 CT

キー画像

Viewer起動 キー画像取込

一時保存 確定

レポート作成

協議会事務局

マニュアルを見る

レポート一覧へ戻る

未読

キビタンID

0707019999999996

依頼元施設

協議会事務局

患者ID

10013

検査日

2016/12/30

患者氏名

anonymous

モダリティ

CT

性別

M

検査部位

生年月日

1970/12/15

作成済レポート登録

レポートシステム等で作成した文書(PDF)を登録できます。



ここに送りたいPDFをアップしてください。
または、[ファイルを選択](#)

PDF削除

※このシステムでレポートを作成する場合は、上記「作成済レポート登録」を行わずに、以下の所見欄等に入力してレポート作成を行ってください。「作成済レポート登録」により登録を行った場合、以下の所見等を入力しても反映されません。

依頼コメント

(依頼コメント)

これは依頼コメントのテストです。テストとテスト

画像所見

診断結果

キー画像

Viewer起動

キー画像取込

一時保存

確定

定型文

過去リスト

新規登録

タイトル

所見なし

編集

作成済のレポートを登録 (PDF)

- ・ファイルのドラッグ&ドロップ (複数選択可)
- ・「ファイルを選択」を押して文書選択のいずれかで登録できます。
- ※画像を選択完了後の画面イメージは次ページ

レポート作成 (作成済レポート登録)

自院のレポートシステムなどで作成したレポートを登録できます。

キビタン健康ネット
画像共有システム

明石 人嗣

レポート作成

協議会事務局

マニュアルを見る レポート一覧へ戻る

作成済レポート登録

レポートシステム等で作成した文書(PDF)を登録できます。

ここに送りたいPDFをアップしてください。
または、**ファイルを選択**
作成済レポートテスト.pdf

PDF削除

※このシステムでレポートを作成する場合は、上記「作成済レポート登録」を行わずに、以下
さい。「作成済レポート登録」により登録を行った場合、以下の所見等を入力しても反映され

作成済のレポートを登録すると、
PDFのファイル名が表示されます。

新規登録

定型文 過去リスト

タイトル
所見なし

編集

依頼コメント

画像所見

PDFを添付

診断結果

PDFを添付

キー画像

Viewer起動 キー画像取込

一時保存 **確定**

確定ボタンで確定
してください。

キビタンID
0707010000000230

依頼元施設
協議会事務局

患者ID
E0327008

検査日
2018/07/24

患者氏名
KAWABUCHI
HIROSHI

モダリティ
CT

性別
M

検査部位
CHEST

生年月日
1956/05/18

作成済のレポートを登録すると、「画像所見」
及び「診断所見」欄にPDFを添付と表示されま
す。
※PDF登録と所見入力を合わせて行うことはで
きません。



お問い合わせ

一般社団法人 福島県医療福祉情報ネットワーク協議会

〒960-8036 福島市新町4番22号 (福島県医師会館1F)

電話 024-525-8818

FAX 050-3730-0128 024-525-8820

URL <https://www.kibitan-k.net>

E-mail info@kibitan-k.net

